

Provtagning - PFAS

Provtagningsmaterial

Normala EDTA-rör (utan plasmaseparator) eller serumrör. För vattenprov - kontakta laboratoriet.

Provtagning

Plasma: Fem ml blod samlas i EDTA-rör. Efter att blodet svalnat centrifugeras röret under 15 minuter vid 800 xg. Plasma förs sedan över till ett nytt rör som skickas för analys.

Serum: Fem ml blod samlas i serum-rör (normalt gula). Blanda och låt rören stå under 30 minuter. Centrifugera sedan som ovan och för över serum till nytt rör som skickas för analys.

Vatten: Fyll minst 5 ml i det rekvirerade röret.

Förvaring och sändning

Provröret med plasma/serum eller vatten läggs i en transporthylsa och skickas till laboratoriet med post i ett paket/kuvert. Försändelse med plasma eller serum märks med en etikett "Biologiska prov". Skriv ut analysbeställningen från vår hemsida, fyll i den och skicka den tillsammans med proven. Skicka proverna så snart som möjligt och förvara dem i kylskåp tills de kan skickas. Skicka inte prov på en torsdag eller fredag eller dag innan helgdag.

Kontaktperson

[Per Leanderson](#), 010-103 44 10

Senast uppdaterad; 260224/PL

